

IT	Aspiratore nasale elettrico
ES	Aspirador nasal eléctrico
EN	Electric nasal aspirator
FR	Aspirateur nasal électrique
DE	Elektrischer Nasenansauger
PT	Aspirador nasal eléctrico
GR	Ηλεκτρική ρινική αναρρόφηση
NO	Elektrisk neseaspirator
DA	Elektrisk næsesuger
PL	Elektryczny aspirator



IT	Manuale di istruzioni
ES	Manual de instrucciones de uso
EN	Instruction manual
FR	Manuel d'instructions d'utilisation
DE	Bedienungsanleitung

PT	Manual de instruções de uso
GR	Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης
NO	Bruksanvisning
DA	Instruktionsmanual
PL	Instrukcja obsługi

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA




WAŻNE

- Nie wystawiaj tego produktu na działanie wysokiej temperatury, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego przez dłuższy czas.
- Unikaj silnego nacisku, uderzeń lub przypadkowego upadku produktu na ziemię.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do odsysania wydzieliny z nosa. Nie używaj go do innych celów, takich jak zasysanie wody czy kontakt ze skórą.
- Gdy siła ssania lub dźwięk silnika znacznie się zmniejszą, naładuj urządzenie.
- Podczas używania urządzenia nie należy wstrzymywać oddechu ani połykać śliny; upewnij się, że usta dziecka są otwarte, aby uniknąć nierównowagi ciśnienia w uszach.
- W przypadku bólu lub dyskomfortu natychmiast przerwij używanie i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie wkładaj z nadmiernym naciskiem końcówki ssącej do jamy nosowej.
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu do późniejszego wglądu.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Zbiorniczek na wydzielinę | 7. Przycisk zasilania |
| 2. Przycisk regulacji siły ssania | 8. Końcówka B |
| 3. Przycisk kolorowych świateł | 9. Końcówka C |
| 4. Przycisk kołysanki | 10. Pęseta |
| 5. Końcówka A | 11. Przewód USB do ładowania |
| 6. Ekran LED | 12. Pudełko do przechowywania |

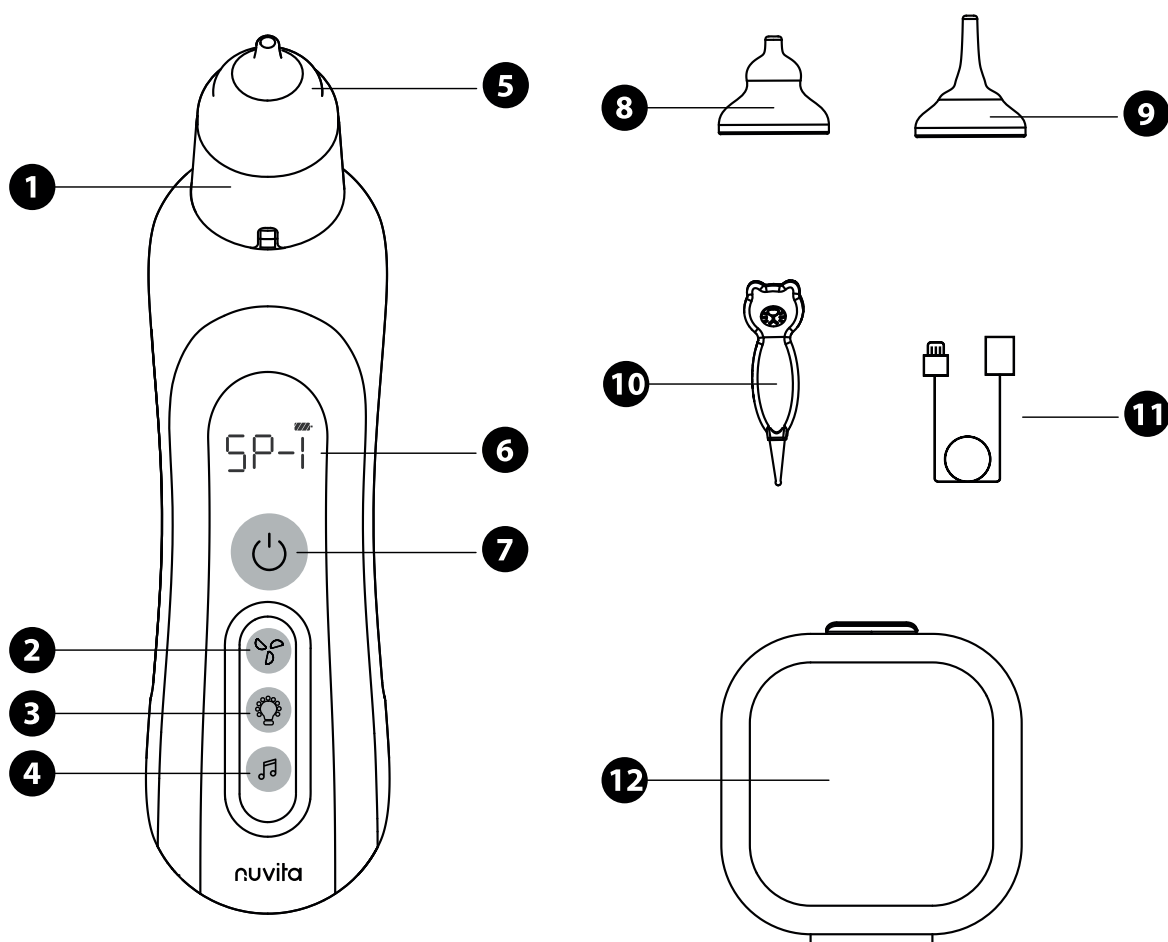

OPIS FUNKCJI

- **PRZYCISK ZASILANIA.** Naciśnij przycisk zasilania **(7)**, aby włączyć aspirator do nosa.
- **PRZYCISK REGULACJI SIŁY SSANIA.** Urządzenie posiada pięć poziomów siły ssania. Naciśnij przycisk regulacji siły ssania **(2)** raz, aby uruchomić poziom 1. Każde kolejne naciśnięcie przycisku zwiększy poziom o jeden, aż do poziomu 5.
- **PRZYCISK KOŁOROWYCH ŚWIATEŁ.** Naciśnij przycisk kolorowych świateł **(3)**, aby włączyć podświetlenie, które bawi dziecko podczas odsysania i automatycznie zmienia kolory.
- **PRZYCISK KOŁYSANKI.** Naciśnij przycisk kołysanki **(4)**, aby odtworzyć 3 kojące melodie, które pomagają dziecku się zrelaksować i poczuć się komfortowo podczas odsysania nosa.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA




WAŻNE

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
- W zestawie nie ma adaptera do ładowania. Można użyć zwykłej ładowarki domowej (Wejście 5V 1A; Wyjście 3,7W).
- Podczas ładowania wskaźnik zasilania na ekranie LED **(6)** będzie migał.
- Po pełnym naładowaniu baterii wskaźnik przestanie migać.
- Przeprowadź cykl czyszczenia przed pierwszym użyciem, zgodnie z instrukcjami na stronie 6.


KROK 1

Wciśnij silikonową końcówkę **(5)**, **(8)** lub **(9)** do zbiorniczka na wydzielinę **(1)**.

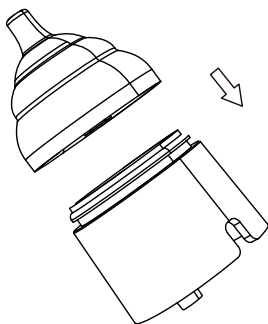


KROK 2


Wciśnij zbiorniczek z założoną końcówką w korpus urządzenia.

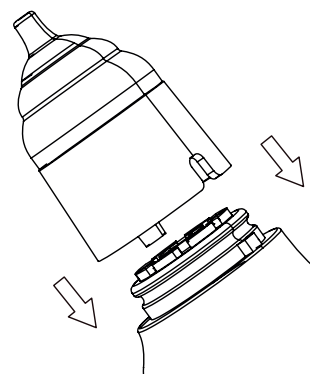


- Umieść urządzenie blisko jamy nosowej, bez pozostawiania szczelin – ułatwi to odsysanie wydzieliny.
- Przed odsysaniem twardej lub lepkiej wydzieliny z nosa zmiękczyć ją, przykładając ciepły ręcznik do nosa lub zakraplając roztwór soli fizjologicznej.
- Zwracaj uwagę na poziom wydzieliny w zbiorniczku – jeśli jest jej zbyt dużo, **może dojść do przelania**.
- Wyłącz urządzenie, gdy zbiorniczek jest pełny, i oczyść go. Usuń resztki wydzieliny z portu ssącego i komory za pomocą patyczka higienicznego.
- Po czyszczeniu opróżnij wodę i dokładnie wysusz końcówkę oraz komorę.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Używaj produktu w prawidłowej pozycji i metodzie, aby uniknąć zassania cieczy do wnętrza urządzenia.

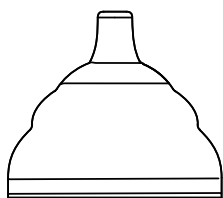

KOŃCÓWKA A


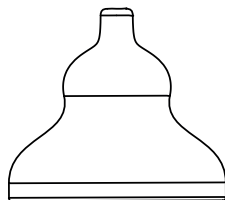


KOŃCÓWKA B

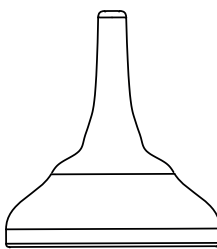

KOŃCÓWKA C

- **KOŃCÓWKA A** Największa końcówka **(5)** pomaga niemowlętom i dzieciom w odsysaniu gęstej, ropnej wydzieliny z nosa.
- **KOŃCÓWKA B** Silikonowa końcówka w kształcie języka **(8)**, odpowiednia do odsysania powierzchniowej wydzieliny.
- **KOŃCÓWKA C** Lejkowata końcówka ssąca **(9)**, przeznaczona do odsysania głębszej wydzieliny.

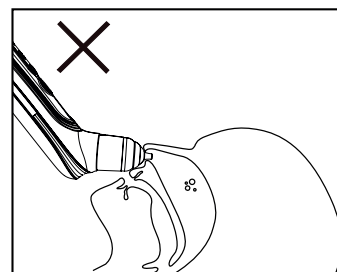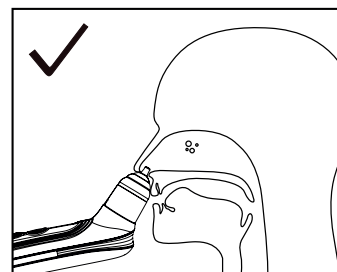


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przestrzegaj poniższych instrukcji, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia oraz uszkodzenia urządzenia:

- **Wyczyść urządzenie przed każdym użyciem.** Jest to kluczowe dla utrzymania odpowiedniej higieny, zwłaszcza w przypadku infekcji bakteryjnych lub wirusowych oraz podczas używania przez małe dzieci.
- **Korpus:** Używaj miękkiej, suchej (lub lekko wilgotnej) ściereczki, bez dodatku detergentów.
- **Części wewnętrzne:** Urządzenie wyposażono w zaawansowany system antyrefluksowy.

Czyszczenie:

1. Napełnij miskę ciepłą wodą.
 2. Zanurz końcówkę w wodzie, skierowaną w dół, i uruchom ssanie na 30 sekund. Woda przepłynie przez końcówkę do zbiorniczka i zostanie wydalona bokiem, skutecznie czyszcząc wszystkie elementy.
 3. Po zakończeniu czyszczenia potrząśnij urządzeniem, trzymając końcówkę skierowaną w dół, aby usunąć resztki wody.
 4. Trzymając urządzenie z końcówką w dół, rozłóż końcówkę i zbiorniczek, a następnie ustaw urządzenie pionowo na kuchennym ręczniku, by umożliwić odparowanie resztek wody, które mogłyby dostać się do wnętrza i spowodować uszkodzenia.
- **Końcówki i zbiorniczek:** Po umyciu zgodnie z poprzednim punktem można przepłukać je bieżącą wodą i wysterylizować przez gotowanie (100°C) lub w sterylizatorze parowym.
 - Nigdy nie myj korpusu urządzenia w zmywarce ani pod bieżącą wodą.
 - Nie używaj potencjalnie toksycznych środków czyszczących, które mogą mieć kontakt ze skórą lub błonami śluzowymi, ani takich, które mogą być wdychane lub połknięte.
 - Nie używaj środków ściernych i nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
 - Unikaj czyszczenia mechanicznego szczoteczkami lub podobnymi narzędziami, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

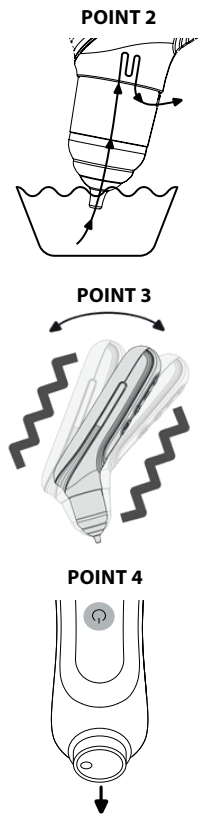

UTYLIZACJA

- Nie naprawiaj ani nie reguluj urządzenia samodzielnie – w takim przypadku nie można zagwarantować jego prawidłowego działania.
- Nie otwieraj urządzenia. Nieprzestrzeganie tej instrukcji spowoduje utratę gwarancji.
- Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis lub sprzedawcę.
- Ze względów ekologicznych nie wyrzucaj urządzenia do odpadów komunalnych po zakończeniu jego okresu użytkowania. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki lub recyklingu w swoim kraju.

DANE TECHNICZNE

Typ	Elektryczny aspirator do nosa
Model	2150
Siła ssania	1. poziom: 25 KPA, 2. poziom: 35 KPA, 3. poziom: 45 KPA, 4. poziom: 55 KPA, 5. poziom: 65 KPA
Rodzaj baterii	Akumulator litowy 3,7V; 450 mAh; Napięcie: 3,7V
Napięcie ładowania	5V; Praca: 3,6–4,2V
Czas ładowania	3 godziny
Czas pracy	55 minut
Poziom hałasu	1. poziom: 44 dB, 2. poziom: 50 dB, 3. poziom: 56 dB, 4. poziom: 60 dB, 5. poziom: 65 dB
Bezpieczeństwo materiałowe	Wolne od BPA, tworzywo ABS i silikon, nietoksyczne

GWARANCJA – ZASADY I WARUNKI

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady fabryczne, liczona od daty zakupu potwierdzonej paragonem lub fakturą. W przypadku zakupu na fakturę gwarancja prawna wynosi 12 miesięcy. 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia produktu, uszkodzeń estetycznych, akcesoriów ani materiałów eksploatacyjnych (np. baterii, końcówek lub elementów narażonych na zużycie). Baterie objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy.

UTRATA GWARANCJI: Gwarancja 12/24-miesięczna traci ważność w następujących przypadkach:

1. Produkt został uszkodzony w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją.
2. Produkt został zmodyfikowany, otwarty lub w inny sposób naruszony.
3. Produkt został zmodyfikowany, otwarty lub w inny sposób naruszony.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI: Z 24-miesięcznej gwarancji wyłączone są:

1. Koszty wymiany lub naprawy elementów ulegających naturalnemu zużyciu oraz te związane z bieżącą konserwacją produktu.
2. Koszty i ryzyko związane z transportem produktu do i z punktu sprzedaży lub autoryzowanego serwisu.
3. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcją.
4. Uszkodzenia spowodowane klęskami żywiołowymi, upadkami, uderzeniami lub nieodpowiednimi warunkami środowiskowymi.
5. Wady, które nie mają istotnego wpływu na działanie produktu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Producent, dystrybutor i wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż produktu nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe ani szkody wynikające z jego nieprawidłowego działania. Zgodnie z obowiązującym prawem nie odpowiadają oni za szkody bezpośrednie, pośrednie, utratę dochodów, oszczędności ani inne konsekwencje wynikające z użytkowania lub braku możliwości korzystania z produktu i/lub dokumentacji (papierowej lub elektronicznej), w tym za brak wsparcia technicznego.

Szczegółowe warunki obsługi serwisowej dostępne są na stronie www.nuvitababy.com.



Anteprima Brands International Ltd

1, Ferris Bldg. St.Luke Street PTA1020

Gwardamangia MALTA - Europe,

www.nuvitababy.com.

info@nuvitababy.com

All rights reserved

Made in China

2150_24_Gen_v1.1.0