

1 Jak używać

- Naciśnij przycisk zasilania – na ekranie pojawi się **188.8°F**, co oznacza **prawidłowe działanie i wystarczający poziom energii**. Następnie wyświetlony zostanie ostatni pomiar zapisany w pamięci, a termometr uruchomi procedurę autodiagnostyki. Po zakończeniu testu ekran pokaże 37,0°C (98,6°F), jeśli urządzenie działa prawidłowo. Jeśli przycisk zasilania zostanie przytrzymany dłużej niż 2 sekundy, ekran wyświetli ostatni wynik pomiaru.
- Po zwolnieniu przycisku na ekranie pojawi się „Lo°C” lub „Lo°F”, co oznacza **gotowość do pomiaru**. Jeśli temperatura jest niższa niż 32,0°C (90°F), symbol „°C” lub „°F” będzie migał przez około 16 sekund, po czym włączy się alarm dźwiękowy trwający ok. 10 sekund.
- Podczas pomiaru symbol „°C” lub „°F” miga, gdy temperatura rośnie. Po osiągnięciu maksymalnej wartości, która się nie zmienia lub zmienia się o mniej niż 0,1° (0,1°F), przez 16 sekund symbol przestaje migać, a alarm dźwiękowy rozbrzmiewa przez ok. 10 sekund.
 - Alarm normalny: Krótkie sygnały dźwiękowe oznaczają prawidłową temperaturę poniżej 37,8° (100°F).
 - Alarm gorączkowy: Szybkie sygnały dźwiękowe oznaczają gorączkę, gdy temperatura przekracza 37,8°C (100°F).
- Na ekranie pojawi się „Hi°” lub „Hi°F”, jeśli zmierzona temperatura przekroczy 43,0°C (109,9°F).
- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij delikatnie przycisk zasilania jeden raz. Jeśli termometr pozostanie bezczynny przez 9 minut, wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania energii, przekroczy 43,0°C (109,9°F).
- W przypadku pomiaru temperatury dziecka konieczny jest nadzór osoby dorosłej

2 - Pomiar

- Zaleca się mierzyć temperaturę dziecka o tej samej porze rano. Wcześniejszy lub późniejszy pomiar może dać wynik zaniżony lub zawyżony i być niemiernodajny.
- Umieść smoczek w ustach dziecka. Usta muszą pozostać zamknięte przez 1 minutę, a oddychanie powinno odbywać się spokojnie przez nos. Wdychane lub wydychane powietrze może wpływać na dokładność pomiaru.



UWAGI

- Normalna temperatura i czas pomiaru mogą się różnić w zależności od osoby.
- Przed każdym pomiarem należy wysterylizować urządzenie.
- Pomiar może być niedokładny, gdy poziom baterii jest niski.

3 - Czyszczenie i konserwacja

- Termometr jest wodoodporny i można go czyścić wodą lub płynem dezynfekującym przy użyciu miękkiej ściereczki. Zaleca się stosowanie środka dezynfekującego zawierającego 95% alkoholu medycznego.



UWAGI

Inne płyny, stężenia lub metody czyszczenia mogą uszkodzić termometr. Produkt nie wymaga kalibracji, a zalecany okres jego użytkowania wynosi 3 lata.

4 - Uwagi

- Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała człowieka; urządzenie niezbędne w każdym gospodarstwie domowym.
- Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy EN12470-3: dotyczącej działania kompaktowych termometrów elektrycznych (predykcyjnych i niepredykcyjnych) z funkcją maksymalnego pomiaru.

- Urządzenie przeszło test emisji EMC, test odporności na zakłócenia zgodnie z EN60601-1-2 oraz test biokompatybilności zgodnie z załącznikiem I dyrektywy MDD.
- Zgodnie z poziomem ochrony przed porażeniem elektrycznym, urządzenie sklasyfikowane jest jako typ BF, zgodnie z EN60601-1.
- Unikaj upuszczania lub uderzania termometru.
- Nie wkładaj urządzenia do wrzącej wody w celu sterylizacji.
- Nie dopuszczaj do kontaktu urządzenia z substancjami chemicznymi; chroń przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłami ciepła. Unikaj silnych źródeł pola elektromagnetycznego, aby zapobiec zakłóceniom.
- Używaj urządzenia w temperaturze otoczenia od +10°C do +35°C (+50°F do +95°F) i wilgotności względnej 40–80%. Podczas przechowywania i transportu dopuszczalna temperatura wynosi od -10°C do +40°C (+14°F do +104°F) i wilgotność 30–90%.
- Użyłację termometru i baterii należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.



OSTRZEŻENIE

Należy przechowywać termometr i baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA – WARUNKI I ZASADY

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne, liczoną od daty zakupu (na podstawie dowodu zakupu).

Gwarancja 24 miesięcy nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zwykłego zużycia części określonych jako „materiały eksploatacyjne” (np. baterie, końcówki, elementy zużywalne).

Gwarancja traci ważność w przypadku:

- Uszkodzenia estetycznego spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub konserwacją niezgodną z instrukcją obsługi.
- Modyfikacji lub ingerencji w produkt.
- Awarii wynikającej z niewłaściwej konserwacji elementów lub akcesoriów (np. utlenienia, osadzania się kamienia, zatrzymania wody lub cięczy, zanieczyszczeń blokujących czujnik, wycieku elektrolitu z baterii).

Z gwarancji 24-miesięcznej wyłączone są:

- Koszty wymiany lub naprawy części ulegających zużyciu oraz koszty bieżącej konserwacji produktu.
- Koszty i ryzyko związane z transportem produktu do i z punktu zakupu lub autoryzowanego serwisu.
- Uszkodzenia spowodowane nieprawidłową instalacją lub użytkowaniem niezgodnym z instrukcją obsługi.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku klęsk żywiołowych, przypadkowych zdarzeń lub niekorzystnych warunków środowiskowych niezgodnych z przeznaczeniem produktu.
- Wady, które mają nieistotny wpływ na działanie urządzenia.

Producent, dystrybutor i wszystkie podmioty zaangażowane w sprzedaż nie ponoszą odpowiedzialności za straty lub szkody ekonomiczne wynikające z awarii produktu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami producent, dystrybutor i sprzedawcy nie odpowiadają w żadnym przypadku za szkody – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie – utratę dochodów, oszczędności lub dodatkowe szkody pochodne wynikające z naruszenia warunków gwarancji, umowy, odpowiedzialności cywilnej, zaniedbania lub innych przyczyn, w tym z niemożności korzystania z produktu lub z dokumentacji papierowej bądź elektronicznej, a także z braku dostępu do serwisu.

Więcej informacji o obsłudze serwisowej można znaleźć na stronie www.nuvitababy.com